

GC


咬合接触検査材
ブルーシリコンで採得したバイトを撮影し、
咬合接触部位の厚みに応じて色分け表示。



咬合接触面積と接触点数を数値とグラフで表示、
全体と左右のバランスを客観的に把握。



咬合接触状態の変化などを比較して把握でき、
患者さんにも、わかりやすく説明。

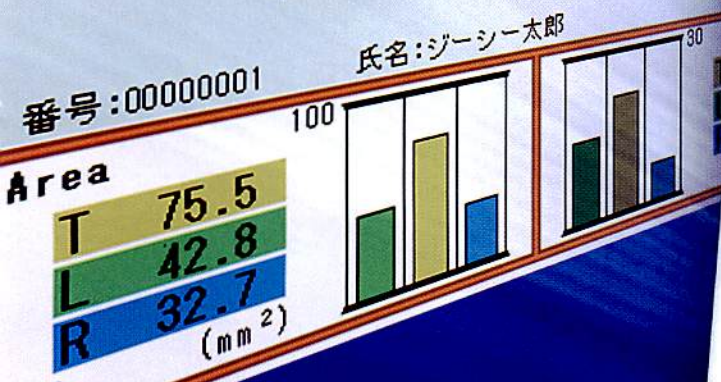

NEW

歯接触分析装置

ジーシー バイトアイ BE-I

咬合接触検査材 ジーシー ブルーシリコン専用

BITE EYE BE-I

シンプル操作とスピーディな解析で 咬合接触状態の可視化を実現。



- 咬合接触検査材「ブルーシリコン」で採得したバイトを、撮影から色調差による解析までワンタッチで簡易操作。
- 咬合接触面積と接触点数を数値とグラフで表示。約200 μm までの厚みに対して14段階で色表示。
- 撮影したバイト画像は保存でき、咬合接触状態の違いの把握や変化などの経過観察にも有効。

ジーシー ブルーシリコン専用
「ブルーシリコン」は、咬合接触状態を透明性のあるブルー色の濃淡で確認する咬合接触検査材です。

STEP 1 採得したバイトをガイドに合わせてセット

画面はタッチパネルでスマート操作

STEP 2 撮影

クラス	厚み(μm)	色
Class1	180~200	Dark Blue
Class2	150~179	Blue
Class3	130~149	Light Blue
Class4	110~129	Light Green
Class5	90~109	Green
Class6	70~89	Yellow-Green
Class7	60~69	Yellow
Class8	50~59	Orange
Class9	40~49	Red-Orange
Class10	30~39	Red
Class11	20~29	Dark Red
Class12	10~19	Dark Purple
Class13	5~9	Purple
Class14	0~4	Black
Class15	—	—

約200 μm までの厚みに対して観察したい厚みの可視化レベルを設定し、咬合接触部位を色分けして表示、観察することができます。

STEP 3 データ解析・画面表示

咬合接触面積を数値とグラフで表示

Area	Value
T	75.5
L	42.8
R	32.7

T:全体 L:左 R:右

咬合接触点数を数値とグラフで表示

Point	Value
T	22
L	15
R	7

T:全体 L:左 R:右

多彩な解析機能でより詳しく咬合接触状態を把握できます。

解析データを4つまで同時表示

部位を限定して解析

拡大して表示

機能 4画面表示、一部領域指定解析、拡大表示、左右領域指定解析、咬合接触点追加、ノイズ除去、可視化レベルの設定、咬合接触面積表示、咬合接触面積データ出力、表示画面出力、解析データエクスポート/インポート

歯接触分析装置
ジーシー バイトアイ BE-I

包装・希望医院価格●一式(ジーシー バイトアイ BE-I 本体, ARシート1枚, パネル保護シート1枚, バイトアイ for PCインストールCD1枚)=¥498,000
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000217

■仕様
寸法: 幅280mm×奥行232.7mm×高さ343mm, 重量: 9.9kg, 電源電圧: AC100V 50/60Hz, 電源入力: 65VA, カメラ: 200万画素, 内蔵PCボードOS: Windows 7 Home Premium, CPU: インテルAtom プロセッサ, メインメモリ: 1GB, 液晶モニター画面サイズ: 10.4インチ, モニタ解像度: SVGA (V800×H600), 4線式抵抗膜方式タッチパネル(シングルタッチ), ハードディスク: 160GB, USBポート: 3個

■バイトアイ for PC動作環境
OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7(各OS 32/64Bit版), プログラム: Microsoft .Net Framework 2.0以上必須, CPU: 1.6GHz以上のIntel系, メモリー: 1GB以上, ディスプレイ: 128MB以上のVRAM, 表示解像度: 800×600以上, USBポート, CD-ROMドライブ: 必須

※上記動作環境を満たしていても、全てのコンピュータでの動作を保証するものではありません。
※ドライブが必須な機器は本製品に接続することはできません。
※.Net Framework 2.0は、Windows XP/XP SP1/XP SP2で自動更新を行っていないコンピュータにインストールされていない場合があります。
※.Net FrameworkはMicrosoft公式サイトよりダウンロードすることができます。各OSに適したバージョンを入手してインストールを行ってください。

適合試験材、咬合接触検査材
ジーシー ブルーシリコン

包装・希望医院価格●1箱: カートリッジ56g(48mL)2本, ミキシングチップII S(ピンク)6本=¥5,600
一般医療機器 23B2X00038000042

※掲載の希望医院価格と参考データは、2011年5月現在のものです(消費税は含まれておりません)。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※カタログ中のソフトウェア画面写真は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷 3-2-14 東京都板橋区蓮沼町 76-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店
お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く) 営業所
http://www.gcdental.co.jp ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286